

<p>کد فرآیند: IN-PH-40</p>	<p>عنوان دستورالعمل : شستشوی دستی یا اتوماتیک و پاکسازی ابزار و وسایل</p>	 <p>دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی درمانی پیمانیه - بهبودکیفیت</p>
<p>تاریخ ابلاغ: ۹۵/۸/۱۱</p>		
<p>تاریخ بازنگری: یکسال بعد</p>		
<p>تعداد صفحه: ۱ از ۱</p>		
<p>ابزار و روش پایش:</p>	<p>دامنه (محدوده): استریلیزاسیون</p>	
<p>روش اجرایی:</p> <p>۱- وسایل و ابزار جراحی در داخل اب به مدت 5 تا 10 دقیقه غوطه ور می شوند.</p> <p>۲- ابزار و وسایل با برس زبر پلاستیکی تمیز می شوند.</p> <p>۳- ابزار و وسایل جراحی شسته شده در مایع ضد عفونی سطح متوسط با قابلیت شویندگی (صابون - دکونکس - ساولن) به مدت 20 Min غوطه ور شود.</p> <p>۵- وسایل ابکشی و خشک و در نهایت پگ شده و جهت استریل کردن منتقل می شوند.</p> <p>۶- کف CSR حداقل 2 بار در روز با تی اغشته به وایتکس ضد عفونی می گردد.</p> <p>۷- دربها و پنجره ها به صورت روزانه تمیز می گردند.</p> <p>۸- جارو و تی و ابزارهای شستشو بایستی از سایر قسمت ها جداگانه در نظر گرفته شود.</p>		
<p>منابع و مراجع: قوانین بیمارستان</p>		
<p>مستندات مرتبط: ابزار شستشو -</p>		
<p>نام و سمت تصویب کننده:</p>	<p>نام و سمت تأیید کننده:</p>	<p>نام و سمت تهیه کننده / تهیه کنندگان:</p>
<p>دکتر قهرمان بمانا - ریاست</p>	<p>عبدالعظیم جوکار - مدیر بیمارستان</p>	<p>عباس قیومی زاده - سرپرستار اتاق عمل منصور عباس زاده - مسئول استریلیزاسیون</p>