

| | | |
|--|---|---|
| <p>کد فرآیند: PR-PH-55</p> <p>تاریخ ابلاغ: ۹۵/۸/۱۱</p> <p>تاریخ بازنگری: یکسال بعد</p> <p>تعداد صفحه: ۱ از ۲</p> | <p>عنوان روش اجرایی : پیشگیری و کنترل عفونت اقدامات درمانی و اسکوپها</p> |  <p>دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی درمانی پیمانیه - بهبود کیفیت</p> |
| <p>ابزار و روش پایش: چک لیست اختصاصی اتاق عمل</p> | <p>هدف: ۱- ارتقای ایمنی بیمار ۲- پیشگیری از انتقال عفونت از طریق اسکوپها</p> | <p>دامنه (محدوده): اتاق عمل</p> |
| <p>تعاریف: ندارد</p> | | |
| <p>مسئولیت ها و اختیارات: مسئولیت تعیین انجام اسکوپها براساس اندیکاسیون برعهده پزشک معالج است. مسئولیت پیشگیری و کنترل عفونت اسکوپها برعهده کارکنان بالینی مرتبط است.</p> | | |
| <p>روش اجرایی:</p> <p>– اگر چه استفاده از اسکوپها از روش های تشخیصی بسیار مفید و موثر به شمار می روند که عوارض قابل توجهی ندارند اما در صورت ضد عفونی نامناسب، عفونت را که یکی از عوارض مهم آن می توان به حساب آورد را می توانند ایجاد کنند.</p> <p>لذا با توجه به این اصل مهم، این مرکز روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت اسکوپها را به صورت ذیل تدوین نموده است.</p> <p>۱ – کلیه پرسنل شاغل که از اسکوپها استفاده می کنند مانند پرسنل اتاق عمل باید آموزش های لازم در زمینه ضد عفونی و نگهداری و اصول پیشگیری و کنترل عفونت مربوط به این تجهیزات را فرا گرفته باشند.</p> <p>۲ – پرسنل شاغل در این قسمت باید در برابر هیپاتیت B ایمن شوند و تیترا آنتی بادی انجام داده باشند.</p> <p>۳ – وسایل حفاظت فردی نظیر دستکش، روپوش، عینک محافظ، ماسک در دسترس بوده و به درستی مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>۴ – مراحل پاکسازی اولیه بلافاصله بعد از استفاده از این وسایل برای جلوگیری از خشک شدن مواد میکروبی بر روی سطح دستگاه انجام شود. در عمل پاکسازی اولیه باید آلودگی قابل رؤیت با محلول و دترجنت مناسب به طور کامل پاک گردند.</p> <p>۵ – پس از انجام مرحله پاکسازی هوا زده می شود و باید ضد عفونی سطح بالا روی آن صورت گیرد.</p> <p>۶ – قبل از انجام ضد عفونی سطح بالا به روش دستی، تمامی اجزا از قبیل دریچه ها، کانال ها، کانکتورها و تمام قطعات جدا شدنی با دقت تمیز شوند و قسمت های جدا شده در محلول دترجنتی که با جنس آنها سازگار است غوطه ور گردد.</p> <p>۷ – از ماده ضد عفونی سطح بالا که دارای تأییدیه FDA می باشد باید استفاده شود.</p> <p>۸ – فقط از محلول های ضد عفونی کننده سازگار با دستگاه استفاده شود.</p> <p>۹ – پس از ضد عفونی سطح بالا، وسایل با آب شسته و در جایی که تهویه کافی دارد قرار می گیرد تا عمل خشک شدن بهتر انجام شود و کدها و قفسه های نگهداری اسکوپها به صورت هفتگی ضد عفونی گردد.</p> <p>۱۰ – بین انجام اسکوپها بیماران زمان مناسب جهت ضد عفونی اسکوپها رعایت شود.</p> <p>۱۱ – سایر وسایل اتاق هایی که در آنجا از اسکوپها استفاده می شود طبق طبقه بندی بحرانی، نیمه بحرانی و غیر بحرانی تمیز و ضد عفونی شوند.</p> | | |

۱۲ - کارکنان اتاق عمل باید لاپراسکوپها را مطابق دستورالعمل استریل نمایند و وسایلی که نسبت به حرارت حساس هستند و قابل اتوکلاو نیستند در سطح بالا ضد عفونی نمایند.

۱۳ - استفاده مجدد از وسایل یکبار مصرف در اسکوپها ممنوع می باشد.

۱۴ - سوزنها و وسایل نوک تیز بعد از استفاده داخل سفتی باکس انداخته شوند.

منابع / مراجع:

راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی / تألیف و تدوین حسین معصومی اصل و سایر همکاران ۱۳۸۶

مستندات مرتبط: کتابچه شستشو و گندزدایی وسایل و تجهیزات

| | | |
|---|--|--|
| نام و سمت تصویب کننده: دکتر قهرمان بمانا-ریاست | نام و سمت تأیید کننده: عبدالعظیم جوکار -مدیر بیمارستان دکتر حشمت شاکری-متخصص عفونی | نام و سمت تهیه کننده / تهیه کنندگان: فاطمه صالح-سوپروایزر کنترل عفونت مریم رقیب نژاد-کارشناس دفتر پرستاری مریم عدنانی-مدیر دفتر پرستاری عباس قیومی زاده- سوپروایزر اتاق عمل سهیلا سامانی جهرمی-مدیر بهبود کیفیت میترا صادقی-سوپروایزر آموزشی |
|---|--|--|