

کد: PR-PH-46	عنوان روش اجرایی:		 <p>دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی درمانی پیمانیه - بهبود کیفیت</p>
تاریخ ابلاغ: ۹۵/۸/۱۱	روش اجرایی گندزدایی و استریل اقلام		
تاریخ بازنگری: یکسال بعد	حساس به حرارت		
تعداد صفحه: ۱			
ابزار و روش پایش:	هدف: ضد عفونی کردن اقلام به منظور جلوگیری از آسیب وارده به آنها	دامنه (محدوده): واحد CSR	
تعاریف: ندارد			
مسئولیت ها و اختیارات: مسئول استریلیزاسیون - پرسنل واحد به منظور مراقبت از ابزار			
روش اجرایی:			
<p>۱- تجهیزات حساس به حرارت همچون وسایل لاپراسکوپ و وارولوژی پس از شستن توسط پرسنل اسکراب در ظروف حاوی قرص فرمالین و محلول دکونکس جهت استریل شدن گذاشته می شود اما پس از هر بار استفاده از این وسایل برای بیمار بعدی این وسایل داخل محلول استرانیوس به مدت 20 دقیقه گذاشته می شود تا ضد عفونی گردد در صورت نیاز به استریل شدن به مدت یک ساعت داخل محلول استرانیوس گذاشته می شوند و پس از ابکشی با سرم نرمال سالین استفاده می گردد.</p> <p>۲- تیغه های لارنگوسکوپ هم بدین صورت توسط پرسنل بیپوشی ضد عفونی و استریل می شوند و برای بیمار بعدی استفاده می گردند</p>			
منابع/مراجع: دستورالعمل محلول ضد عفونی کننده			
مستندات مرتبط: مستندات مشاهده. مصاحبه			
نام و سمت تصویب کننده: دکتر قهرمان بمانا-ریاست	نام و سمت تأیید کننده: عبدالعظیم جوکار-مدیر بیمارستان دکتر حشمت شاکری-متخصص عفونی	نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان: عباس قیومی زاده-سرپرستار اتاق عمل منصور عباس زاده-مسئول استریلیزاسیون	